


Ascensia MICROLET.

Automatyczny nakłuwacz z regulowaną głębokością nakłucia

Automatyczny nakłuwacz Ascensia™ MICROLET® jest używany do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej z opuszki palca. Jest on łatwy w użyciu, zmniejsza do minimum przykre odczucia i jest ważną częścią programu samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi. Osobom chorym na cukrzycę zalecamy skonsultowanie się z lekarzem na temat własnego programu monitorowania poziomu glukozy.

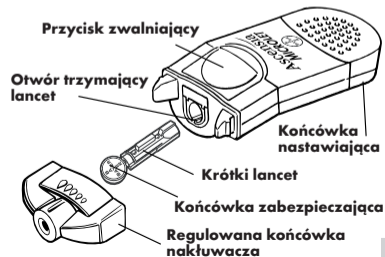

1

Potrzebne materiały:

Do otrzymywania próbek krwi	Ascensia™ MICROLET® nakłuwacz automatyczny. Ascensia™ MICROLET® lancety. Ascensia™ MICROLET® regulowana końcówka (5 opcji). Mydło i ciepła woda. Chusteczka higieniczna.
Do pomiaru poziomu glukozy	Glukometr. Paski testowe lub sensory do pomiaru glukozy.
Do czyszczenia	Woda i łagodny detergent.

UWAGA: Jeśli nakłuwacz Ascensia™ MICROLET® jest używany przez więcej niż jedną osobę, należy zawsze korzystać z NOWEGO LANCETU I KOŃCÓWKI NAKŁUWACZA.


2

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przygotowanie miejsca nakłucia.

Umyć dłonie mydłem i ciepłą wodą. Dokładnie spłukać i osuszyć. Zapewnia to czystość, a także zwiększa przepływ krwi przez palec.

2. Zdjęcie końcówki nakłuwacza


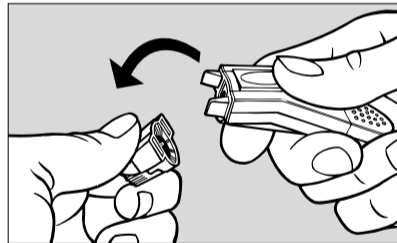


Zdjąć końcówkę nakłuwacza Ascensia™ MICROLET® przez lekkie odgięcie z góry na dół.

3

3. Włożenie krótkiego lancetu.


Przekręcić końcówkę zabezpieczającą na krótkim lancecie o 1/4 obrotu (nie zdejmować). Mocno wepchnąć lancet do otworu trzymającego. Po usłyszeniu lub wyczuciu kliknięcia należy kontynuować wprowadzanie lancetu aż do końca.

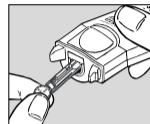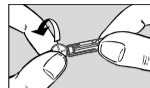

Odkręcić końcówkę zabezpieczającą i zachować ją w celu zabezpieczenia zużytego lancetu przed jego wyrzuceniem.

4

4. Ponowne założenie końcówki nakłuwacza.

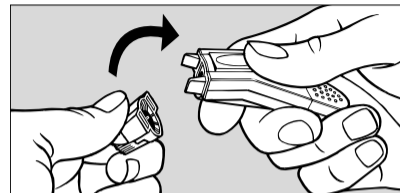

Założyć ponownie końcówkę nakłuwacza płaską powierzchnią do góry.

5. Wybór głębokości nakłucia.

Głębokość nakłucia zależy od ustawienia regulowanej końcówki nakłuwacza oraz od siły nacisku w miejscu nakłucia. Użytkownik powinien określić, jaka kombinacja jest najlepsza. Rozpocznij od wyboru płytkiego nakłucia, aby ocenić czy wystarczy krwi do przeprowadzenia testu.

5

W celu uzyskania płytkiego nakłucia, wybierz ustawienie końcówki, które wskazuje małą kroplę krwi.


Aby uzyskać większą kroplę krwi, odpowiednio przestaw regulator.

Możliwy jest wybór 5 ustawień. W przypadku delikatnej skóry wybierz opcję płytkiego nakłucia, średnią dla skóry normalnej oraz głębokie nakłucie przy skórze twardej.




6. Wybranie miejsca nakłucia

Do nakłucia lepsze są boczne strony opuszki palca (patrz zakreskowane miejsca na rysunku). Przed nakłuciem należy rozmasować wybrany palec przez pocieranie dłoni i palca w stronę miejsca nakłucia bez dotykania go.

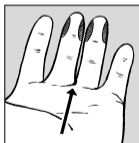

7. Wykonanie nakłucia.

Mocno przytknąć nakłuwacz Ascensia™ MICROLET® do miejsca nakłucia. Nacisnąć przycisk zwalniający lancet nie poruszając palcem ani nakłuwaczem. Im mocniej będzie naciśnięty nakłuwacz, tym głębsze będzie nakłucie.

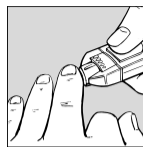

Ważne: W celu ponownego użycia nakłuwacza, naciągnąć i zwolnić lancet, jak przedstawiono na rysunku.



8. Uformowanie kropli krwi.

Po nakłuciu odczekać kilka sekund, a następnie pocierać rękę i palec w stronę miejsca nakłucia, aby uformować kroplę krwi. Nie ścisnąć palca wokół miejsca nakłucia.




9. Nałożenie krwi

Nałożyć krew na pasek testowy lub sensor zgodnie z instrukcjami dołączonymi do pasków, sensorów lub glukometru. **Wytrzeć** miejsce nakłucia czystą, suchą chusteczką higieniczną. **Ucisnąć** miejsce nakłucia aż do ustania krwawienia.

10. Usunięcie zużytego nakłuwacza.

Zdjąć końcówkę nakłuwacza. **(Ta sama końcówka może być używana tylko przez jedną osobę).** Pozostawiając zużyty lancet w nakłuwaczu, wcisnąć wystającą igłę do końcówki zabezpieczającej. Wciskając przycisk, zwolnić lancet.

Zużyty lancet ostrożnie wyjąć z nakłuwacza tak, aby uniknąć skażenia lub zakażenia innych osób.

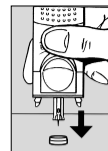


Czyszczenie:

Zdjąć końcówkę nakłuwacza, umyć zewnętrzną powierzchnię nakłuwacza Ascensia™ MICROLET® oraz jego końcówkę wodą i łagodnym detergentem. Dokładnie spłukać i zostawić do wyschnięcia przed ponownym użyciem. Nałożyć końcówkę nakłuwacza.

Ascensia i Microlet są znakami handlowymi firmy Bayer HealthCare LLC. Bayer oraz krzyż firmy Bayer są znakami handlowymi Bayer AG.



Bayer HealthCare

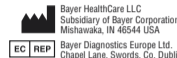

Bayer HealthCare LLC
Subsidiary of Bayer Corporation
Mishawaka, IN 46544 USA
Bayer Diagnostics Europe Ltd.
Chapel Lane, Swords, Co. Dublin, Ireland



0088

(50241797)
AN44550G Rev. 8/04

Bayer Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
POLSKA
tel: +48 22 572 38 50